

## PRODUKTINFORMATION

# ORLICLEAN – Reinigungsmittel für Ohrstöpsel

Bei **ORLICLEAN** handelt es sich um ein selbsttätig reinigendes, bakterizides Spezialpräparat für Impedanzstöpsel.

Durch den hohen Anteil an perlaktivem Sauerstoff reinigt **ORLICLEAN** sehr schonend und gründlich.

### ANWENDUNG:

Geben Sie etwa einen Teelöffel **ORLICLEAN** in einen mit warmen Wasser gefüllten Becher ( entspricht ca. 250 ml ).

Die Stöpsel sollten etwa 20-30 Minuten wässern, und anschließend mit klarem warmen Wasser abgespült werden.

Bei massiven Verunreinigungen (z.B. verhärtetes Cerumen) im Innenloch des Stöpsels ist bei Bedarf mechanisch vorzuarbeiten (mit einem Wattestäbchen, Pfeifenreiniger o.ä.).

Nach dem Reinigungsvorgang lassen Sie die Stöpsel auf einem saugfähigen Tuch ausgiebig trocknen.

### SICHERHEITSHINWEIS:

Bitte benutzen Sie **niemals** feuchte Ohrstöpsel zur tympanometrischen Untersuchung. Durch den bei der Messung erzeugten Unterdruck wird eventuell Feuchtigkeit in die Messsonde gesaugt und das Gerät technisch schwer beschädigt.

### BESTELLHINWEISE:

**ORLICLEAN** wird als Pulver in Flaschen zu je 150 g geliefert. Verpackungseinheit sind üblicherweise 4 Flaschen, auf Wunsch erhalten Sie jedoch auch Einzelflaschen.

**BESTELLNUMMER TY 050.00**

**1 Flasche € 4,90**  
**ab 4 Flaschen € 4,60**